



°M WARMER SYSTEM | IL RISCALDAMENTO DEI FLUIDI DIVENTA SEMPLICE

Quando la rapidità è essenziale ed è necessario concentrarsi sul paziente non puoi perdere tempo nell'assemblare le attrezzature. Questo è il motivo per cui °MEQU ha sviluppato un sistema efficiente e intuitivo per il riscaldamento dei fluidi.



Semplice da preparare

Semplice da utilizzare – si adatta perfettamente ai set di somministrazione IV senza alcuna possibilità di errori di connessione.



Tempo

Il tempo necessario alla preparazione dell' °M Warmer è inferiore a 30 secondi così da offrire tutta l'attenzione necessaria al paziente.



Potabilità

Il Sistema °M Warmer ha un peso totale di 760 grammi e occupa il minimo spazio grazie alle sue dimensioni tra le più ridotte sul mercato.

Portata

Un sistema per il riscaldamento dei fluidi deve fornire il valore di flusso necessario. Il Sistema °M Warmer è stato progettato per fornire fino a 150ml/min di fluido alla temperatura corporea, indipendentemente dalla temperatura iniziale. In caso di necessità il Sistema °M Warmer è in grado di erogare flussi superiori ai 150ml/min, non raggiungendo la temperatura impostata, ma garantendo una temperatura calda.

A carica completa il Sistema °M Warmer può riscaldare 1.5L di fluido freddo (5°C-39°C) o 3L di fluido a temperatura ambiente (20°C-39°C)

1,2,3 Setup

STEP- 01 | PREPARAZIONE

Posizionare il catetere sul paziente. Sconfezionare il Sistema °M Warmer e rimuovere il sigillo protettivo.

STEP- 02 | FISSAGGIO


Fissare il Sistema °M Warmer al set d'infusione IV e collegare il catetere/Ago IO. Il Sistema °M Warmer si collega ai set di infusione standard senza rischio errori.

STEP- 03 | CONNESSIONE

Collegare l'alimentatore al Sistema °M Warmer. Entro 10 secondi dal collegamento il fluido viene riscaldato alla temperatura impostata.

Specifiche

- > Portata elevata-riscalda fino a 150 ml di fluido freddo al minuto, da 4°C a 39°C ($\pm 3^\circ\text{C}$)
- > Elevata capacità di riscaldamento - 1.5L di fluido freddo (5°C-39°C ($\pm 3^\circ\text{C}$)) o 3L di fluido a temperatura ambiente (20°C-39°C ($\pm 3^\circ\text{C}$))
- > Impostazione rapida: sono necessari meno di 30 secondi, anche in situazioni di trauma
- > Basso Volume di priming, inferiore a 3.5 ml
- > Leggero, con un peso complessivo di 760g
- > Parte monopaziente piccola, leggera ed adesiva; permette di fissare il Sistema °M Warmer al catetere, riducendo la dissipazione del calore
- > Facile da utilizzare: si inserisce perfettamente in un set standard.
- > Adatto per l'uso in elicottero
- > Classificazione IP : IP54
- > Temperatura di utilizzo: 0-40°C
- > Robusto, portatile ed alimentato a batteria

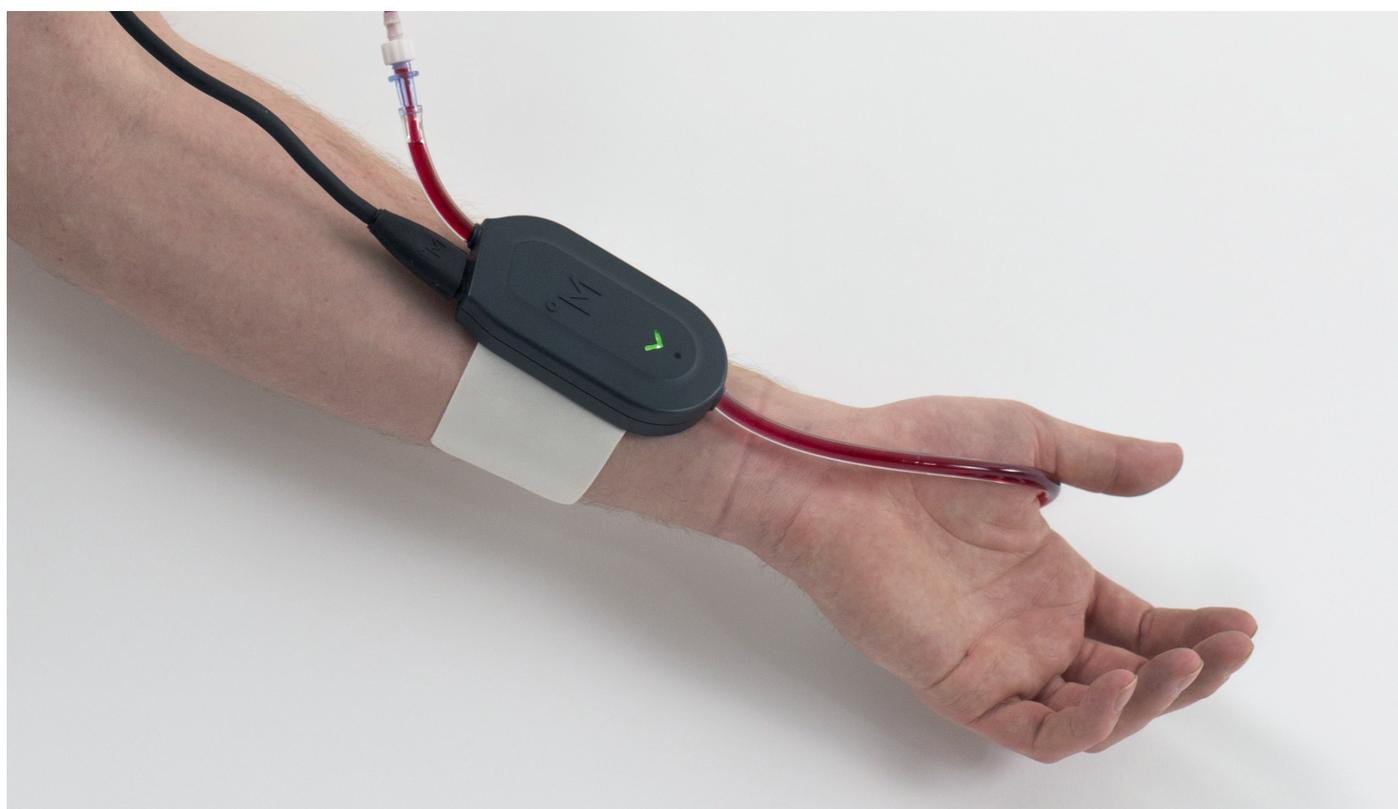

°M Warmer Flyer IT 17.11.2019

°MEQU

Ole Maaløes Vej 3
DK-2200 Copenhagen N
Denmark
hello@mequ.dk
www.mequ.dk

Distributore per l'Italia:
Bexencardio Italia Srl
Viale Brianza 181
20092 - Cinisello Balsamo (MI)
info@bexencardioitalia.it
Tel: 02.38608273